

本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、この添付文書をよく読んでからご使用ください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ケアリーヴ® 治す力®

医療用品(4) 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDNコード 71025000
販売名「ケアリーヴ HCS」

製品特長

キズを早くきれいに治す

①モイストヒーリング(湿潤療法)

ハイドロコロイド素材のモイストパッド®が体液を吸収・保持し、白くふくらみ、キズを治すのに最適な潤い環境を保ちます。かさぶたをつくらず、新しい皮膚が早くきれいに再生するのを促進します。

②キズぐちだけを集中ケア

パッド部分にのみハイドロコロイドを使用。キズ以外の健康な皮膚にストレスをかけず、キズの潤いを保ち、痛みをおさえ、快適にキズぐちを保護します。



キズぐちから出てくる体液(浸出液)には、キズを治す成分が含まれています。

水に強い低刺激性粘着剤

独自に開発した低刺激性粘着剤を使用。肌へのやさしさとはがれにくさを実現しました。

関節の動きにやさしくフィット

全方向に伸縮する高密度ウレタン不織布が、関節を曲げても繊細にフィットします。通気性にもすぐれるため、白くふやけにくく、キズ以外の健康な皮膚にもストレスをかけないやさしい貼り心地です。

■再使用禁止



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の部位には使用しないでください。
 - ①感染したキズ(キズの周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿を持つ等の異常がある)。
 - ②感染を起こす可能性のあるキズ(深いキズ、咬まれたキズ、ガラス・木片・砂・ほこりなどの異物が入っているキズ、受傷してから時間が経って、かさぶたができていたり、浸出液や血液が乾いて固まっているキズ)。
 - ③深さしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ。
 - ④にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮膚炎などの症状。
 - ⑤目の周囲、粘膜。
- 個包装を開封した状態で長時間放置しないでください。一度使用したものを再使用しないでください。
- パッドサイズより大きなキズには使用しないでください。キズの大きさより大きいパッドサイズの製品を使用してください。
- キズに塗布した殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等を水道水などでしっかり洗い流してから、本品を使用してください。
- 患部を清潔にし、パッド部分にキズをあてて使用してください。
- はがす時は、出血させたり、再生した皮膚を取り除いたり、皮膚を傷めたりしないよう、体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- 3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 浸出液がもれたり、テープ部分がはがれたりした場合は、そのまま貼り続けしないでください。その場合は本品をはがし、キズを水道水等でよく洗浄した後、新しいものに貼り替えてください。
- パッド部分が水などで濡れたり、汚れたりした時は、新しいものに貼り替えてください。
- 使用時に個包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないでください。

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - ①糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
 - ②強い倦怠感を感じていたり、発熱があるなど全身状態がよくない人。
- 次の場合は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。
 - ①本品の使用により、キズの悪化、化膿、感染(キズぐちの周りが赤い、ズキズキした痛みがある、膿を持っている、熱やはれ等の異常が認められる)、キズの治りが悪い等の症状があらわれた場合。
 - ②本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等を生じた場合。
 - ③貼り替えながら、数日間使用しても症状がよくならない場合。
 - ④本品をはがした時に、臭くて粘りのある淡黄色の膿のようなものがあり、その周囲が赤くはれている場合。

切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかざれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

【ケアリーヴ[®] 治す力[®]】の使い方

- 1) 定められた使用方法を守ってください。
- 2) 小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。また、3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 3) 本品は外用ですので、内服しないでください。


〈貼る前に確認すること〉

- ① 本品を使用するケガが以下の状態でないことを確認してください。
 - 感染したキズ ● 感染を起こす可能性のあるキズ ● かさぶたができたキズ (本品の湿潤効果が十分に得られない場合があります。)
 - 深いさしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ ● にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮膚炎などの症状 ● 目の周囲、粘膜
- ② キズの大きさより大きいパッドサイズの製品を選んでください。
- ③ 本品を切って使用しないでください。
- ④ 個包装を開封して長時間放置したものを使用したり、一度使用したものを再使用しないでください。

貼付前

- キズを水道水などでよく洗い、水気を清潔なティッシュペーパーやタオル等でふきとってからご使用ください。(殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等は本品と併用しないでください)

貼付時

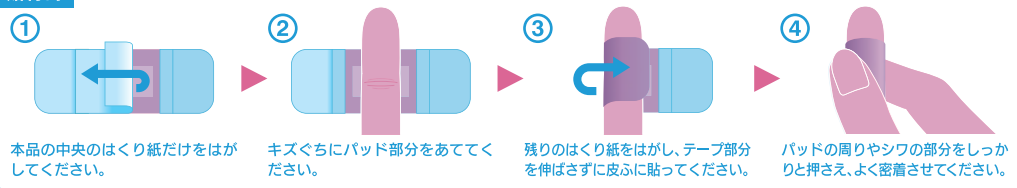

貼ってしばらくすると、キズぐちから出てくる体液(浸出液)を本品のパッドが吸収・保持し、その部分がゲル化し白くふくらみます。キズが治るにしたがい、体液(浸出液)の分泌が減ってきます。そのため貼り替えるたびに、その白いふくらみが小さくなります。

※貼っている最中は、少なくとも2～3日に1回はキズを観察し、感染を示す症状がないことを確認してください。観察後は新しい製品を使用してください。ただし、感染の症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

※本品のパッドは粘着性があり、浸出液を吸収すると白くふくらみます。吸収量によっては、パッドの表面がでこぼこしたり、白くふくらまない場合もあります。また、パッドに黒っぽい粒が見られることがありますが、成分由来のもので品質上問題ありません。

はがす時・貼りかえる時

- はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- はがした時に膿のようなものがないか確認してください。膿は淡黄色で粘りがあり臭いがします。膿のようなものが認められた場合には本品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。ただし、透明で臭いがないゲル状の場合は、キズぐちからの体液(浸出液)を本品が吸収したもので、水道水等で洗い流してください。
- はがす時の力でキズぐちを傷めないように、本品をはがす時にパッドがキズぐちに残ることがあります。キズぐちに残ったパッドは、お湯や水で洗いながらはがしてください。

規 格

製品	サイズ		入り数
	テープ部	パッド部	
Sサイズ	20mm×55mm	8mm×17mm	14枚
Mサイズ	25mm×70mm	13mm×22mm	12枚
Lサイズ	30mm×72mm	16mm×29mm	9枚
LLサイズ	50mm×70mm	25mm×35mm	7枚
ビッグサイズ	60mm×80mm	35mm×45mm	5枚
ジャンボサイズ	80mm×100mm	45mm×60mm	4枚
指先用	58mm×55mm	14mm×29mm	8枚

保管及び取扱い上の注意

保管上の注意

直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい、小児の手のとどかない所に保管してください。

取扱い上の注意

個箱の側面に使用期限を表示しています。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【製造販売・発売元】ニチバン株式会社 〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 TEL 03-5978-5622

【製造元】ニチバンメディカル株式会社

【お問合せ窓口】ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL ☎0120-377218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、この添付文書をよく読んでからご使用ください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ケアリーヴ® 治す力®

医療用品(4) 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDNコード 71025000
販売名「ケアリーヴ HCS」

製品特長

キズを早くきれいに治す

①モイストヒーリング(湿潤療法)

ハイドロコロイド素材のモイストパッド®が体液を吸収・保持し、白くふくらみ、キズを治すのに最適な潤い環境を保ちます。かさぶたをつくらず、新しい皮膚が早くきれいに再生するのを促進します。

②キズぐちだけを集中ケア

パッド部分にのみハイドロコロイドを使用。キズ以外の健康な皮膚にストレスをかけず、キズの潤いを保ち、痛みをおさえ、快適にキズぐちを保護します。



キズぐちから出てくる体液(浸出液)には、キズを治す成分が含まれています。

水に強い低刺激性粘着剤

独自に開発した低刺激性粘着剤を使用。肌へのやさしさとはがれにくさを実現しました。

関節の動きにやさしくフィット

全方向に伸縮する高密度ウレタン不織布が、関節を曲げても繊細にフィットします。通気性にもすぐれるため、白くふやけにくく、キズ以外の健康な皮膚にもストレスをかけないやさしい貼り心地です。

■再使用禁止



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の部位には使用しないでください。
 - ①感染したキズ(キズの周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿を持つ等の異常がある)。
 - ②感染を起こす可能性のあるキズ(深いキズ、咬まれたキズ、ガラス・木片・砂・ほこりなどの異物が入っているキズ、受傷してから時間が経って、かさぶたができていたり、浸出液や血液が乾いて固まっているキズ)。
 - ③深さしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ。
 - ④にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮膚炎などの症状。
 - ⑤目の周囲、粘膜。
- 個包装を開封した状態で長時間放置しないでください。一度使用したものを再使用しないでください。
- パッドサイズより大きなキズには使用しないでください。キズの大きさより大きいパッドサイズの製品を使用してください。
- キズに塗布した殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等を水道水などでしっかり洗い流してから、本品を使用してください。
- 患部を清潔にし、パッド部分にキズをあてて使用してください。
- はがす時は、出血させたり、再生した皮膚を取り除いたり、皮膚を傷めたりしないよう、体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- 3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 浸出液がもれたり、テープ部分がはがれたりした場合は、そのまま貼り続けしないでください。その場合は本品をはがし、キズを水道水等でよく洗浄した後、新しいものに貼り替えてください。
- パッド部分が水などで濡れたり、汚れたりした時は、新しいものに貼り替えてください。
- 使用時に個包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないでください。

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - ①糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
 - ②強い倦怠感を感じていたり、発熱があるなど全身状態がよくない人。
- 次の場合は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。
 - ①本品の使用により、キズの悪化、化膿、感染(キズぐちの周りが赤い、ズキズキした痛みがある、膿を持っている、熱やはれ等の異常が認められる)、キズの治りが悪い等の症状があらわれた場合。
 - ②本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等を生じた場合。
 - ③貼り替えながら、数日間使用しても症状がよくならない場合。
 - ④本品をはがした時に、臭くて粘りのある淡黄色の膿のようなものがあり、その周囲が赤くはれている場合。

切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかざれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

【ケアリーヴ® 治す力®】の使い方

- 1)定められた使用方法を守ってください。
- 2)小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。
また、3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 3)本品は外用ですので、内服しないでください。

〈貼る前に確認すること〉


- ①本品を使用するケガが以下の状態でないことを確認してください。
 - 感染したキズ ● 感染を起こす可能性のあるキズ ● かさぶたができたキズ(本品の湿潤効果が十分に得られない場合があります。)
 - 深いさしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ ● にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮膚炎などの症状 ● 目の周囲、粘膜
- ②キズの大きさより大きいパッドサイズの製品を選んでください。
- ③本品を切って使用しないでください。
- ④個包装を開封して長時間放置したものを使用したり、一度使用したものを再使用しないでください。

貼付前

- キズを水道水などでよく洗い、水気を清潔なティッシュペーパーやタオル等でふきとってからご使用ください。(殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等は本品と併用しないでください)

貼付時

はくり紙をはがし、創傷面にパッド部分をあて、関節を35°から45°程度曲げた状態で、テープ部分を伸ばさずに貼り、しっかりと押さえてよく密着させてください。

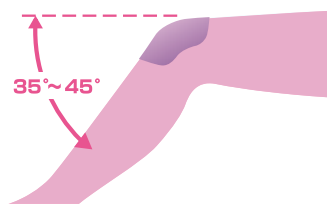

貼ってしばらくすると、キズぐちから出てくる体液(浸出液)を本品のパッドが吸収・保持し、その部分がゲル化し白くふくらみます。キズが治るにしたがい、体液(浸出液)の分泌が減ってきます。そのため貼り替えるたびに、その白いふくらみが小さくなります。

※貼っている最中は、少なくとも2〜3日に1回はキズを観察し、感染を示す症状がないことを確認してください。観察後は新しい製品を使用してください。ただし、感染の症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

※本品のパッドは粘着性があり、浸出液を吸収すると白くふくらみます。吸収量によっては、パッドの表面がでこぼこしたり、白くふくらまない場合もあります。また、パッドに黒っぽい粒が見られることがありますが、成分由来のもので品質上問題ありません。

はがす時・貼りかえる時

- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- はがした時に膿のようなものがないか確認してください。膿は淡黄色で粘りがあり臭いがします。膿のようなものが認められた場合は本品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。ただし、透明で臭いが無いゲル状の場合は、キズぐちからの体液(浸出液)を本品が吸収したもので、水道水等で洗い流してください。
- はがす時の力でキズぐちを傷めないように、本品はがす時にパッドがキズぐちに残ることがあります。キズぐちに残ったパッドは、お湯や水で洗いながらはがしてください。

規 格

製品	サイズ		入り数
	テープ部	パッド部	
Sサイズ	20mm×55mm	8mm×17mm	14枚
Mサイズ	25mm×70mm	13mm×22mm	12枚
Lサイズ	30mm×72mm	16mm×29mm	9枚
LLサイズ	50mm×70mm	25mm×35mm	7枚
ビッグサイズ	60mm×80mm	35mm×45mm	5枚
ジャンボサイズ	80mm×100mm	45mm×60mm	4枚
指先用	58mm×55mm	14mm×29mm	8枚

保管及び取扱い上の注意

保管上の注意

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい、小児の手のとどかない所に保管してください。

取扱い上の注意

個箱の側面に使用期限を表示しています。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【製造販売・発売元】ニチバン株式会社 〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3 TEL 03-5978-5622

【製造元】ニチバンメディカル株式会社

【お問合せ窓口】ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL ☎0120-377218

受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、この添付文書をよく読んでからご使用ください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ケアリーヴ® 治す力®

医療用品(4) 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDN コード 71025000
販売名「ケアリーヴ HCS」

製品特長

キズを早くきれいに治す

①モイストヒーリング(湿潤療法)

ハイドロコロイド素材のモイストパッド®が体液を吸収・保持し、白くふくらみ、キズを治すのに最適な潤い環境を保ちます。かさぶたをつくらず、新しい皮ふが早くきれいに再生するのを促進します。

②キズぐちだけを集中ケア

パッド部分にのみハイドロコロイドを使用。キズ以外の健康な皮ふにストレスをかけず、キズの潤いを保ち、痛みをおさえ、快適にキズぐちを保護します。



キズぐちから出てくる体液しんじゆつえき (浸出液)には、キズを治す成分が含まれています。

水に強い低刺激性粘着剤

独自に開発した低刺激性粘着剤を使用。肌へのやさしさとはがれにくさを実現しました。

関節の動きにやさしくフィット

全方向に伸縮する高密度ウレタン不織布が、関節を曲げても繊細にフィットします。通気性にもすぐれるため、白くふやけにくく、キズ以外の健康な皮ふにもストレスをかけないやさしい貼り心地です。

■再使用禁止



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の部位には使用しないでください。
 - ①感染したキズ(キズの周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿を持つ等の異常がある)。
 - ②感染を起こす可能性のあるキズ(深いキズ、咬まれたキズ、ガラス・木片・砂・ほこりなどの異物が入っているキズ、受傷してから時間が経って、かさぶたができていたり、浸出液や血液が乾いて固まっているキズ)。
 - ③深いさしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ。
 - ④にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮ふ炎などの症状。
 - ⑤目の周囲、粘膜。
- 個包装を開封した状態で長時間放置しないでください。一度使用したものを再使用しないでください。
- パッドサイズより大きなキズには使用しないでください。キズの大さきより大きいパッドサイズの製品を使用してください。
- キズに塗布した殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等を水道水などでしっかり洗い流してから、本品を使用してください。
- 患部を清潔にし、パッド部分にキズをあてて使用してください。
- はがす時は、出血させたり、再生した皮ふを取り除いたり、皮ふを傷めたりしないよう、体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- 3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 浸出液がもれたり、テープ部分がはがれたりした場合は、そのまま貼り続けしないでください。その場合は本品をはがし、キズを水道水等でよく洗浄した後、新しいものに貼り替えてください。
- パッド部分が水などで濡れたり、汚れたりした時は、新しいものに貼り替えてください。
- 使用時に個包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないでください。

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - ①糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
 - ②強い倦怠感を感じていたり、発熱があるなど全身状態がよくない人。
- 次の場合は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。
 - ①本品の使用により、キズの悪化、化膿、感染(キズぐちの周りが赤い、ズキズキした痛みがある、膿を持っている、熱やはれ等の異常が認められる)、キズの治りが悪い等の症状があらわれた場合。
 - ②本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等を生じた場合。
 - ③貼り替えながら、数日間使用しても症状がよくなる場合。
 - ④本品をはがした時に、臭くて粘りのある淡黄色の膿のようなものがあり、その周囲が赤くはれている場合。

切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかざれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」


【ケアリーヴ[®] 治す力[®]】の使い方

- 1) 定められた使用方法を守ってください。
- 2) 小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。また、3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 3) 本品は外用ですので、内服しないでください。

貼付前

- キズを水道水などでよく洗い、水気を清潔なティッシュペーパーやタオル等でふきとってからご使用ください。(殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等は本品と併用しないでください)

貼付時

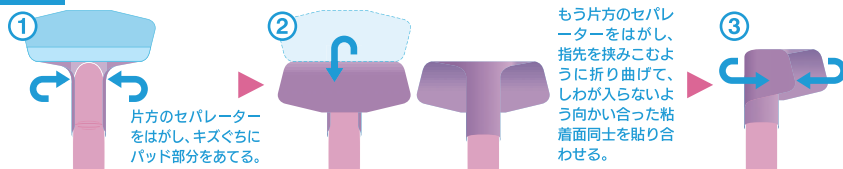

〈貼る前に確認すること〉

- ① 本品を使用するケガが以下の状態でないことを確認してください。
 - 感染したキズ ● 感染を起こす可能性のあるキズ ● かさぶたができたキズ (本品の湿潤効果が十分に得られない場合があります。)
 - 深いさしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ ● にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮膚炎などの症状 ● 目の周囲、粘膜
- ② キズの大きさより大きいパッドサイズの製品を選んでください。
- ③ 本品を切って使用しないでください。
- ④ 個包装を開封して長時間放置したものを使用したり、一度使用したものを再使用しないでください。

貼ってしばらくすると、キズぐちから出てくる体液(浸出液)を本品のパッドが吸収・保持し、その部分がゲル化し白くふくらみます。キズが治るにしたがい、体液(浸出液)の分泌が減ってきます。そのため貼り替えるたびに、その白いふくらみが小さくなります。

※ 貼っている最中は、少なくとも2～3日に1回はキズを観察し、感染を示す症状がないことを確認してください。観察後は新しい製品を使用してください。ただし、感染の症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

※ 本品のパッドは粘着性があり、浸出液を吸収すると白くふくらみます。吸収量によっては、パッドの表面がでこぼこしたり、白くふくらまない場合もあります。また、パッドに黒っぽい粒が見られることがありますが、成分由来のもので品質上問題ありません。

はがす時・貼りかえる時

- はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- はがした時に膿のようなものがないか確認してください。膿は淡黄色で粘りがあり臭いがします。膿のようなものが認められた場合には本品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。ただし、透明で臭いがないゲル状の場合は、キズぐちからの体液(浸出液)を本品が吸収したものであるため、水道水等で洗い流してください。
- はがす時の力でキズぐちを傷めないように、本品をはがす時にパッドがキズぐちに残ることがあります。キズぐちに残ったパッドは、お湯や水で洗いながらはがしてください。

規 格

製品	サイズ		入り数
	テープ部	パッド部	
Sサイズ	20mm×55mm	8mm×17mm	14枚
Mサイズ	25mm×70mm	13mm×22mm	12枚
Lサイズ	30mm×72mm	16mm×29mm	9枚
LLサイズ	50mm×70mm	25mm×35mm	7枚
ビッグサイズ	60mm×80mm	35mm×45mm	5枚
ジャンボサイズ	80mm×100mm	45mm×60mm	4枚
指先用	58mm×55mm	14mm×29mm	8枚

保管及び取扱い上の注意

保管上の注意

直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい、小児の手のとどかない所に保管してください。

取扱い上の注意

個箱の側面に使用期限を表示しています。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【製造販売・発売元】ニチバン株式会社 〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 TEL 03-5978-5622

【製造元】ニチバンメディカル株式会社

【お問合せ窓口】ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL ☎0120-377218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)